



KRIOAPLIKATOR

- inovativno i elegantno rješenje!

Krioaplikator je švicarski proizvod koji osigurava vrhunske rezultate rada, uz maksimalnu jednostavnost upotrebe i minimalne troškove zahvata.

Jedinstvena tehnologija omogućuje direktan kontakt tekućeg dušika i tkiva, te se pri tretmanu postiže konstantna temperatura od -89°C .

Krioaplikator karakterizira:

- niska cijena tretmana
- jednostavno i sigurno rukovanje
- ekstremno precizna aplikacija sa konstantnim prodiranjem temperature do -89°C
- pristaje u ruku poput olovke
- pogodno za gotovo sve kožne promjene
- pribor za apliciranje u ginekologiji, dermatologiji, proktologiji, urologiji, plastičnoj kirurgiji, stomatologiji, veterini, podijatriji i estetiци

Nakon zahvata ne ostaju ožiljci, aplikacija je bezbolna, nema potrebe za anestezijom, nema krvarenja, ne uništavaju se biološke funkcije i strukture, ima odličan kozmetički efekt. U većini slučajeva je dovoljan jedan tretman, ali se po potrebi može i ponavljati. Jedan spremnik plina je dostatan za cca 35 tretmana. Po pražnjenju spremnika, na krioaplikator jednostavno fiksirate novi puni spremnik, dok prazan spremnik jednostavno odbacite. Spremnici sadrže nepovratne ventile koji Vam pružaju maksimalnu sigurnost, i osiguravaju da nema gubitaka plina ako krioaplikator ne koristite duže vrijeme.

Osnovne prednosti krioaplikatora u odnosu na klasičnu bocu tekućeg dušika su sljedeće: niska cijena krioaplikatora, jednostavnost upotrebe, neograničen rok upotrebe spremnika plina (plin ne hlapi), te korištenje medicinskog tekućeg dušika u krioaplikatoru koji je mnogo čišći i učinkovitiji od industrijskog tekućeg dušika koji se koristi u bocama.

Tablica ispod prikazuje samo dio velikog broja kožnih anomalija koje se mogu tretirati krioaplikatorom. Preporučena vremena apliciranja su bazirana na testiranjima i iskustvima velikog broja korisnika.

U nekim slučajevima je moguća potreba za dužim vremenom aplikacije ili ponavljanjem tretmana ovisno o vrsti anomalije, debljini kože i drugim faktorima. Vrijeme trajanja tretmana je u potpunosti odluka liječnika.

Anomalija	preporučeno vrijeme aplikacije u sekundama
Acne	4-6
Keratosis actinica	5-7
Age pigments	1-2
Basiloma	8-9
Cavernous angioma	4-6
Granuloma anulare	5-6
Hemangiolympangioma	6-8
Juvenile warts	3-4
Keloids	4-6
Senile keratoma	7-8
Condyloma	8-12
Lentigo maligna	4-5
Lentigo senile	2-3
Nevus pigmentosus	8
Plantar warts	15-20
Solar keratosis	4-5
Seborrhoeic warts	6-8
Verruca vulgaris	8-10
Soft fibroma	4-5

Neki od liječnika koji koriste krioaplikator:

Prof. Dr. Sc. Velimir Šimunić (Zagreb)
Dr. Gordan Crvenković (Rovinj)
Dr. Lidija Pejković (Solin)
Dr. Miroslav Furdek (Duga Resa)
Dr. Martina Jerbić Cecelja (Varaždin)
Dr. Suzana Posavčević (Nova Gradiška)
Dr. Ivana Pentz (Zagreb)
Dr. Štefica Findri Guštek (Sesvete)
Dr. Sanja Gršić Burić (Zagreb)
Dr. Šemso Rošić (Cazin)
Dr. Arsen Šimunović (Delnice)
Dr. Vesna Janko Radovan (Vrsar)
itd...

komplet sa 2 spremnika plina (dostatno za cca 70 tretmana),
krioaplikatorom i 2 nastavka uključujući nastavak
za ginekologiju



autoklavabilni pozlaćeni nastavci:

nastavak za ginekologiju



Medical centar d.o.o.
Karlovačka cesta 4c
10020 Zagreb
Telefon: 01/6525-965
Fax: 01/6524-842
E-mail: info@medical-centar.hr
Web: www.medical-centar.hr

